

器具洗浄用洗剤

Hinge-Free[®]
ヒンジ・フリー

ウォッシャー・
ディスインフェクター用
器具用潤滑剤

Lubricant



Hinge-Freeは、ノンシリコンベースの金属製医療器具用潤滑剤です。Hinge-Freeを定期的にご使用になることで、外科用器具の滑らかで簡易な動作を維持することができます。試験データでもHinge-Freeが蒸気や酸化エチレンの透過を妨げないことが実証されています。



MIS機器、
超微細手術用器具



汎用外科手術用器具



アルミ容器

STERIS[®]



サクラ精機

特徴	利点
優れた潤滑特性	器具の耐用寿命を延ばし、滑らかな動作を維持します
中性 pH	ステンレススチールやアルミニウムにも安心して使用できます。*
防腐剤含有	防腐剤の配合により、濃縮製品でも微生物の増殖を助長しません。

*真鍮／銅素材には、不適合です。

容量	コード番号	pH
18.93リッター	103105	7.8
3.78リッター (4本)	103108	

使用方法：自動洗浄の場合

Hinge-Freeは、最後の蒸気滅菌の前に、清浄な状態の外科用器具に使用します。Hinge-Freeを1、脱イオン水、蒸留水、もしくは脱塩水を6の割合で混合してください。滅菌の前に、予洗した器具を（できるだけ開いた状態で）30～45分間、溶液に浸漬します。器具を取り出し、水を切ります。器具の洗い流しや拭き取りは必要ありません。これで、器具の包装や滅菌の準備が整いました。潤滑混合剤は、最長で14日間まで使用することができます。器具メーカーが推奨する量で投入し、1ガロンあたり1/2～2液量オンス（4～16mL）の希釈範囲でご使用ください。

適合材質

- ・ステンレススチール
- ・アルミニウム

その他の情報

- ・技術データシート
- ・MSDS（製品安全データシート）



※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

販売元 **サクラ精機株式会社**

感染制御事業本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12
 新川フロンティアビル
 ☎03-3553-8034 FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル ☎0120-037-311

ホームページ <http://www.sakurajp.com>

製造元 ステリス社