

優れた、潤滑・防錆性能。  
乾燥時間の短縮で、効率アップ。

サクラ 潤滑防錆・乾燥促進剤

# ソニックループ DRY

## SD-310



サクラ精機

サクラ 潤滑防錆・乾燥促進剤

# ソニックループ DRY



4 L



20 L

潤滑、防錆、乾燥促進。  
3つの処理効果を、最大限に発揮します。

## 潤滑・防錆

ソニックループDRYの  
主成分である脂肪酸エステル  
(食品添加物)が器材にコーティング  
されることで、軸部などの動きを  
滑らかにするとともに、  
錆の発生を防ぎます。

## 乾燥促進

ソニックループDRYは  
表面張力が低く、器材に薄く  
広がりますので、乾燥効率が  
一段と向上します。  
またこれにより、乾燥時間の  
短縮がはかれます。

## 低濃度

器材表面に効率良くコーティング  
する作用があるエステル系成分を  
適切に配合しておりますので、パラ  
フィン乳化製品よりも低濃度でご  
使用いただけます。また、液性は  
中性、低発泡性です。

仕 様	
商品名	サクラ 潤滑防錆・乾燥促進剤 ソニックループDRY
型 式	SD-310                      SD-320
内 容 量	4L (約3.8kg)                      20L (約19kg)
入 数	4本                                      1個
用 途	医療機器の潤滑・防錆、乾燥促進
主 成 分	脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩
液 性	中性 pH7.4 (原液)
使用方法 (濃度)	ジェット式洗浄装置および内視鏡処置具洗浄装置用 標準使用濃度：0.5%(200倍希釈) 洗浄装置により0.2~0.5%の範囲でご使用ください



ご 注 意

■ステンレス以外の金属器具(アルミニウムや真鍮などの非鉄金属)には不向きです。

■次の機器には使用を控えてください。

体内埋め込み器具(インプラント等)  
樹脂、ゴム、ガラス等の防錆処理を必要としない医療機器  
薬液投与を目的とした医療機器(注射筒、薬杯、チューブ等)

■使用時にはゴーグル・手袋・マスクを着用し、使用方法および使用上の注意を確認してからご使用ください。

■本商品は、ジェット式洗浄装置・ジェット式超音波洗浄装置・内視鏡処置具洗浄装置用です。超音波洗浄装置および浸漬用途にはご使用できません。

※ 商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

発 売 元 **サクラ精機株式会社**

感染制御事業本部    〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12  
新川フロンティアビル  
☎03-3553-8034    FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル    ☎0120-037-311

ホームページ    <http://www.sakurajp.com>