



プロリスティカ 10倍濃縮アルカリ洗浄剤

少ない量で
最大の効果

■優れた洗浄・除去能力

■安定した洗浄力

■中和剤不要

コンパクトで経済的な
濃縮タイプ



サクラ精機

洗浄・保護能力に優れた次世代型洗浄剤

コンパクトで経済的な濃縮タイプ

濃縮タイプのため一回の使用量が少なく、容器もコンパクトで取り扱いやすくなりました。保管スペースもとりません。

優れた洗浄・除去能力

血液・脂肪分などに極めて高い除去能力を発揮します。

安定した洗浄力

特殊な金属イオン封鎖剤を配合しておりますので、比較的硬度の高い水を使用しても洗浄力が安定しています。また、本製品には中和剤は不要です。

少ない泡立ち

泡立ちが少ないため、洗浄装置の性能を最大限に引き出し素早いすすぎ処理を実現します。

	10倍濃縮*タイプ
液性	アルカリ性 pH>13.0(原液)
使用濃度	0.2~0.8mL/L (0.02~0.08%)
内容量	5L(約6.6kg)
梱包単位	1本/箱
型式	1C12T4APJ

※従来製品比

医薬用外劇物該当品

プロリステカシリーズ



酵素系中性洗浄剤、潤滑剤もご用意しております



ご注意

- 本製品はステンレス以外の金属器具(アルミニウムや真鍮など)の非鉄金属には不向きです。樹脂の種類によっては変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてからご使用ください。
- 本製品は医薬用外劇物該当品です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 目や皮膚との接触を避けてください。目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流し、医師にご連絡ください。
- 使用時には防護服・ゴーグル・手袋・マスクを着用し、使用方法および使用上の注意を確認してからご使用ください。
- 他の化学薬品を追加しないでください。本製品の効能が失われる場合があります。
- 保管の際は、蓋をしっかりと閉め、直射日光の当たらない常温あるいは冷所で保管して下さい。

※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

販売元 **サクラ精機株式会社**

メディカル営業本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12
新川フロンティアビル
☎03-3553-8034 FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル ☎0120-037-311

ホームページ <http://www.sakurajp.com>

製造元 ステリス社 STERIS

